


Cómo limpiar y guardar una mascarilla reutilizable.

5 pasos sencillos




PASO 1

Tira suavemente de los elásticos para quitar la mascarilla. No dejes que la parte exterior toque la cara. Pon la mascarilla en una bolsa o caja. Asegúrate de lavarte las manos después.

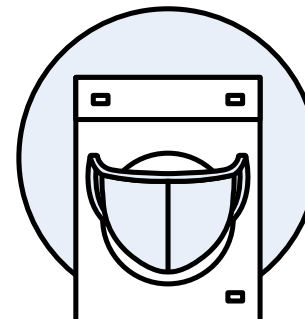


PASO 2

Puedes lavar la mascarilla a mano a 35°C con el detergente habitual durante un minuto. También puedes lavarla a máquina con el máximo de temperatura permitido.

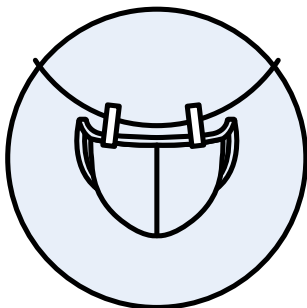


PASO 3

Asegúrate de que la mascarilla está 100% seca antes de reutilizarla. Métela en la secadora o déjala secar al aire.

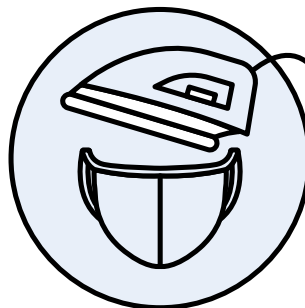

PASO 4

Plancha las arrugas antes de reutilizarla. Planchar con vapor caliente ayuda además a desinfectar la mascarilla.

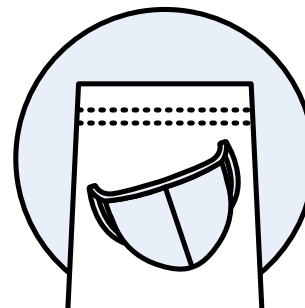

PASO 5

Guarda la mascarilla en un lugar seco como una bolsa de plástico o portamascarillas. Asegúrate de que la mascarilla no se humedezca, ya que puede perjudicar a sus propiedades de protección.